

Entretien masque facial nominatif, tuyau et filtres pour CoughAssist / matériel HUG

Matériel à nettoyer	Produit à utiliser	Technique	Fréquence	Remarque
Masque facial (patient unique)	Liquide vaisselle	1°) Démonter le masque 2°) Frotter à l'aide d'une compresse* imbibée d'eau* et de savon-détergent de type liquide vaisselle) 3°) Rincer soigneusement sous l'eau* du robinet 4°) Sécher* soigneusement Le déposer dans un sachet individuel propre	Après chaque utilisation	A faire dans l'unité d'hospitalisation du patient par l'utilisateur, au moment du retrait du masque *Si patient Mesure Spécifique Protection selon VigiGerme® utiliser : compresse stérile, eau filtrée
Circuit patient (patient unique) Tuyau, masque facial, adaptateur et filtre antibactérien	∅	Jeter dans la filière habituelle des déchets	1x/semaine ou plus si : . souillures visibles . filtre obstrué . appareil utilisé pour un autre patient	Présence du filtre antibactérien obligatoire pour toute utilisation
Appareil	Des-Sur®	Frotter la surface avec une compresse imbibée de produit, Laisser sécher	Avant et après chaque utilisation	
Filtre à air	∅	Jeter dans la filière habituelle des déchets	Tous les 6 mois	