

## LOCALISATION D'UN PRODUIT DANS STERIGEST

Rédigé : C.BREHIER /03.03.2015


Vérifié : A.BRUNETTI /03.03.2015

Approuvé : H.NEY/03.03.2015


1. Aller sur traçabilité puis localiser




2. Voici l'écran de localisation

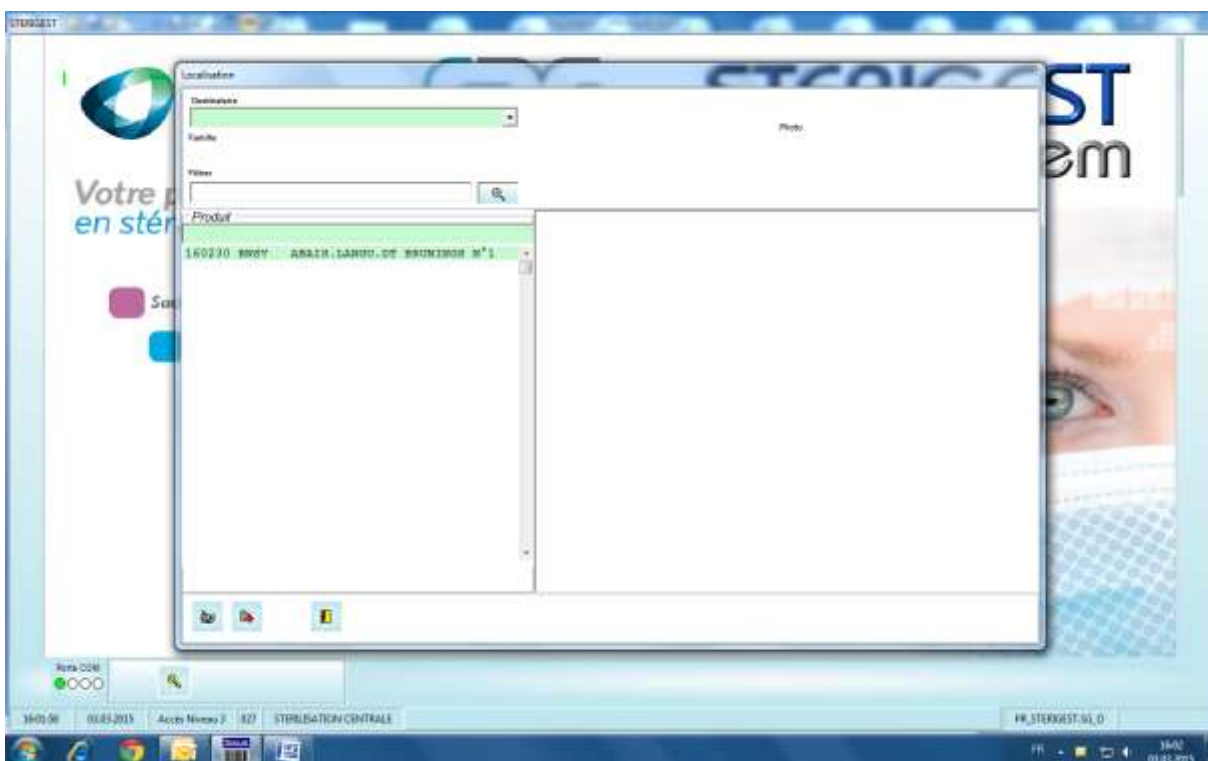


3. En cliquant sur le menu déroulant du destinataire rechercher le nom du bloc à qui appartient le produit et le sélectionner en cliquant dessus la ligne est bleu.

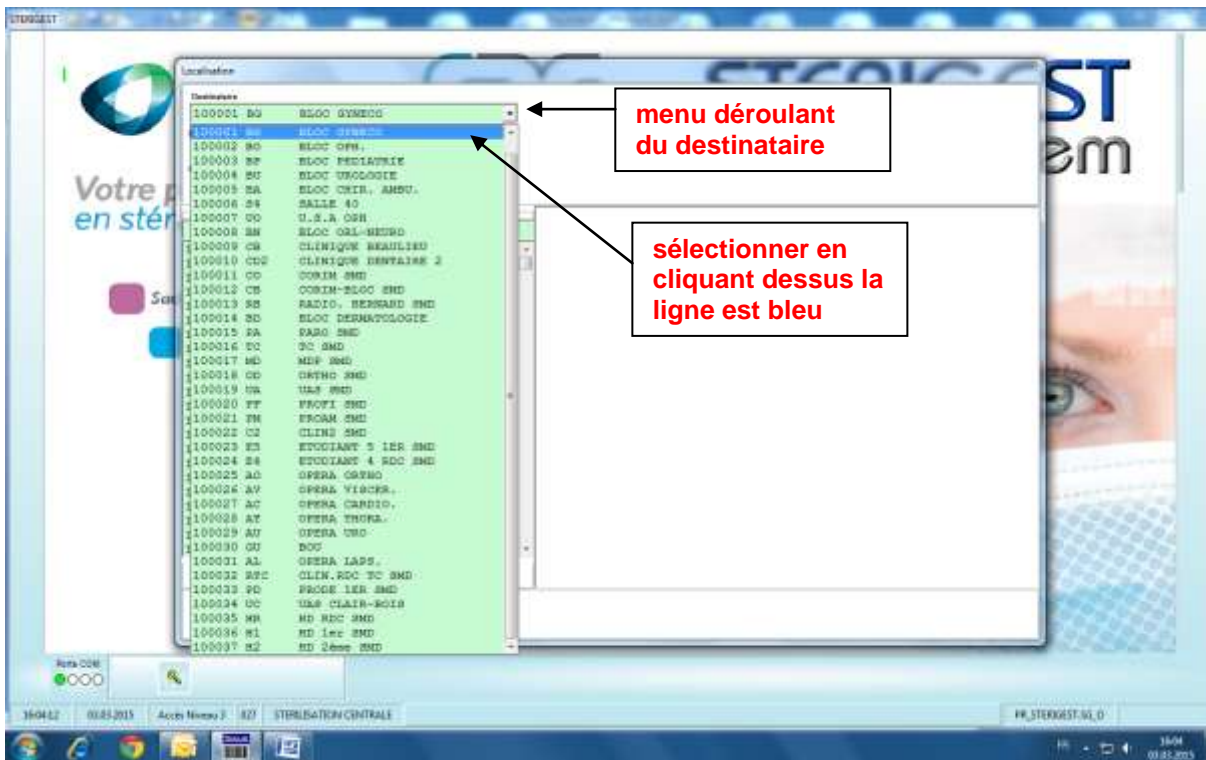


4. Dans le cadre filtrer taper la désignation du produit (la plus petite partie de la désignation toujours sans accent et correspondant au nom enregistré dans sterigest, voir le classeur des codes barres si besoin). La recherche se fait uniquement avec une partie de la désignation et pas un code sterigest ) puis cliquer sur la loupe pour lancer la recherche.

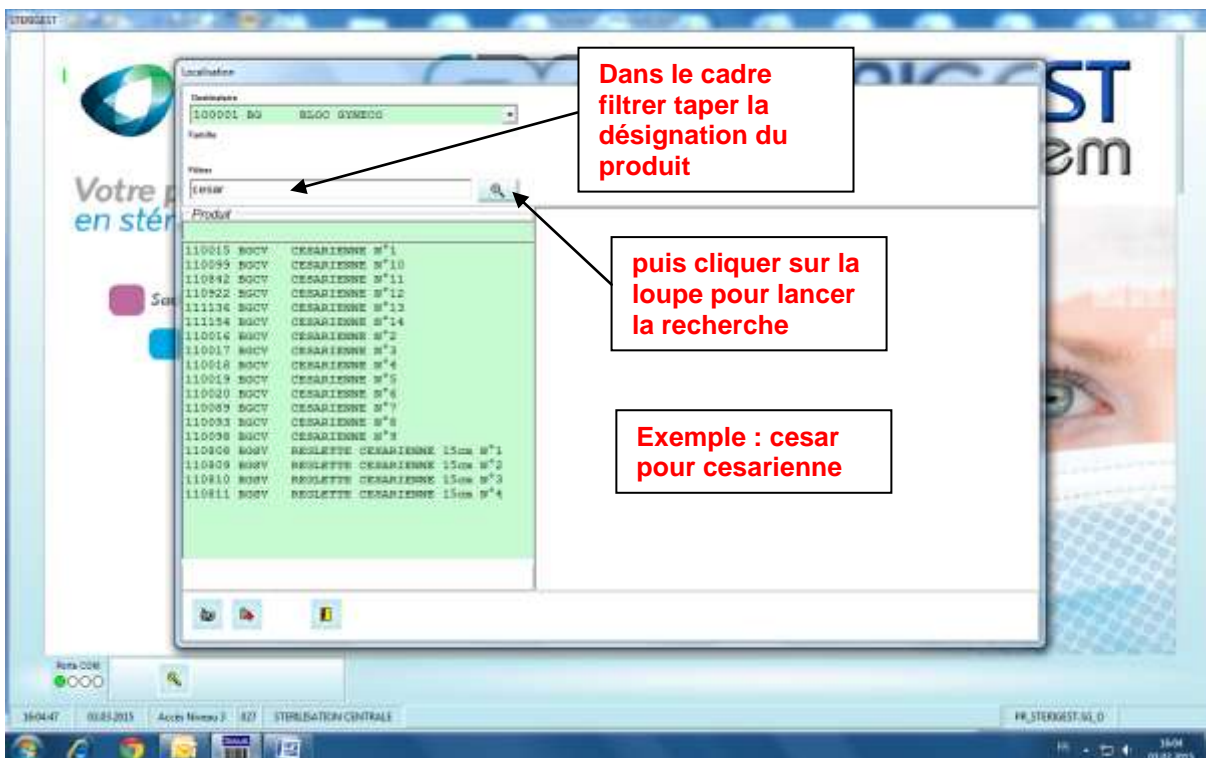

5. Pour localiser cliquer sur la ligne correspondant au produit recherché, dans la partie production (blanche) apparaît la dernière étape faite. Exemple ici le produit est conditionné, stérilisé et distribué.

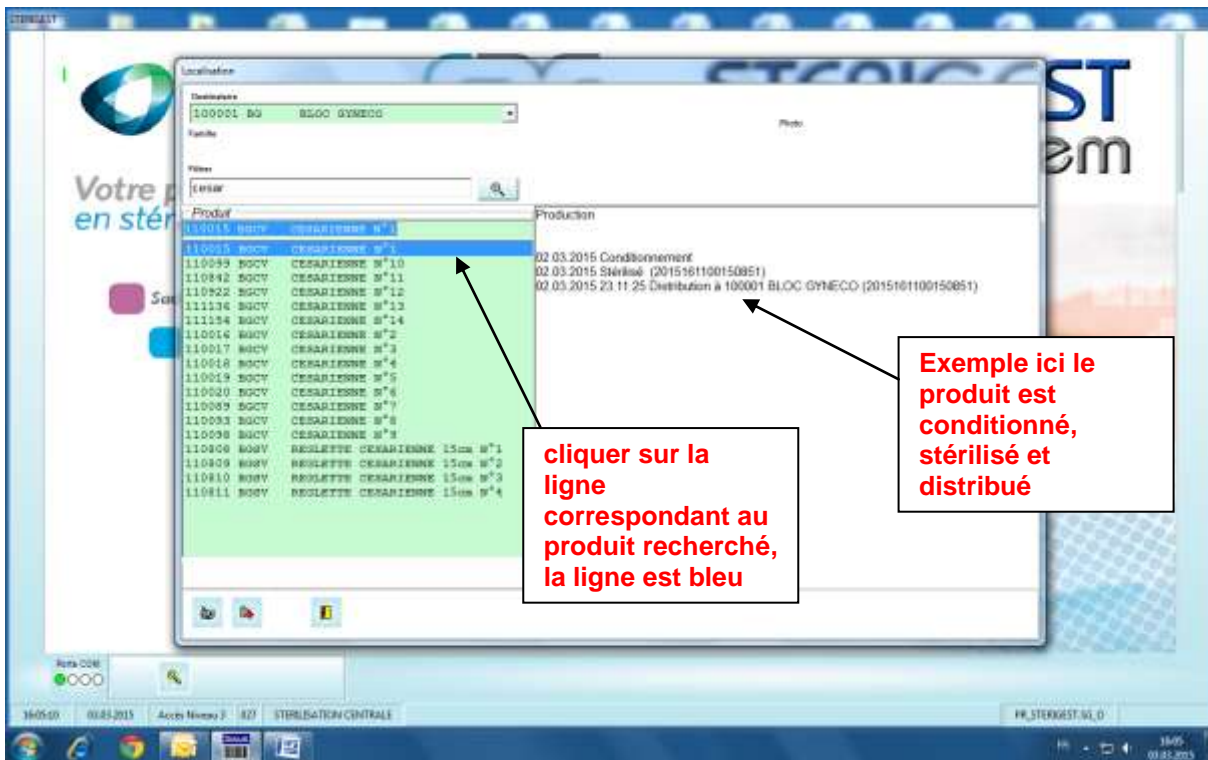


6. Quand dans le cadre une partie est jaune le produit est en stérilisation dans une phase de prétraitement avant le conditionnement. Exemple ici : le produit est en phase prétraitement en lavage automatique

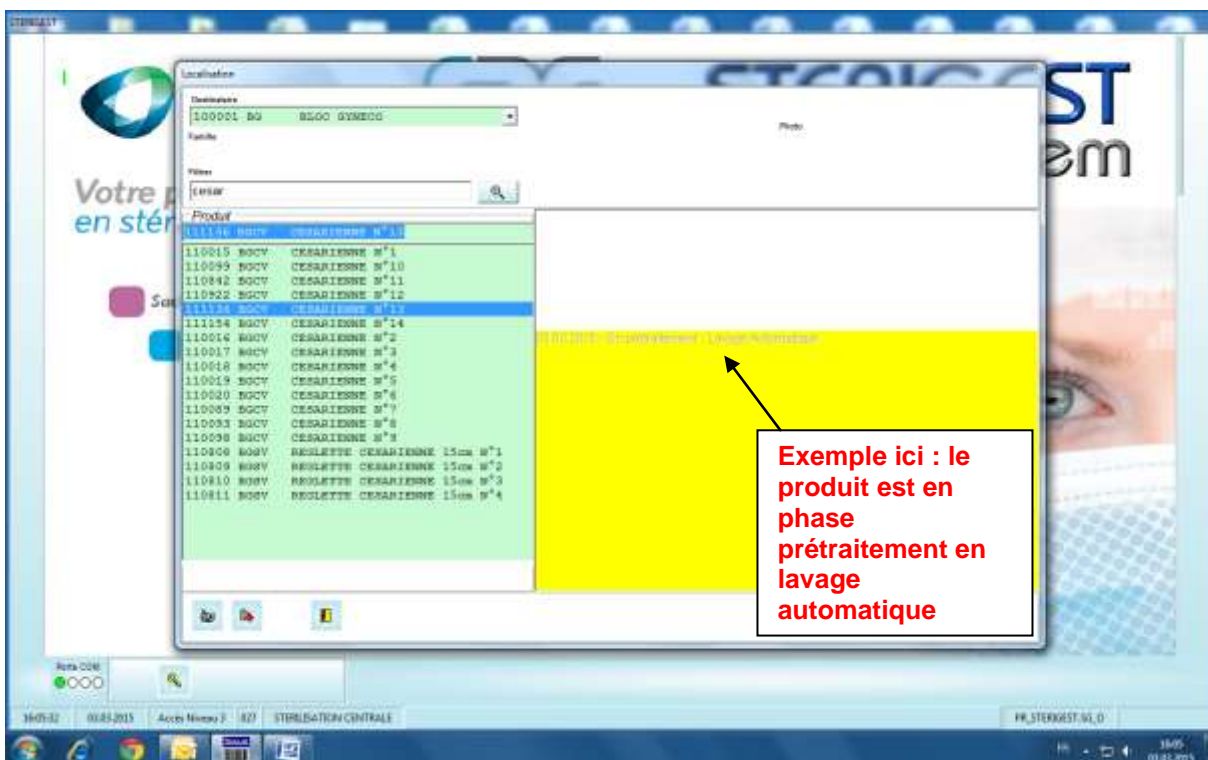


7. Exemple ci-dessous :

Si apparaît uniquement un conditionnement et non chargé en stérilisateur et si la date du conditionnement est du jour alors : le matériel n'est pas encore stérilisé.  
 Si la date du conditionnement est éloignée de celle du jour alors il s'agit peut-être d'une réparation en cours ou alors une mauvaise impression d'étiquette mais pas encore indiquée. En cas de date éloignée pour plus de précision appeler la stérilisation 31063.

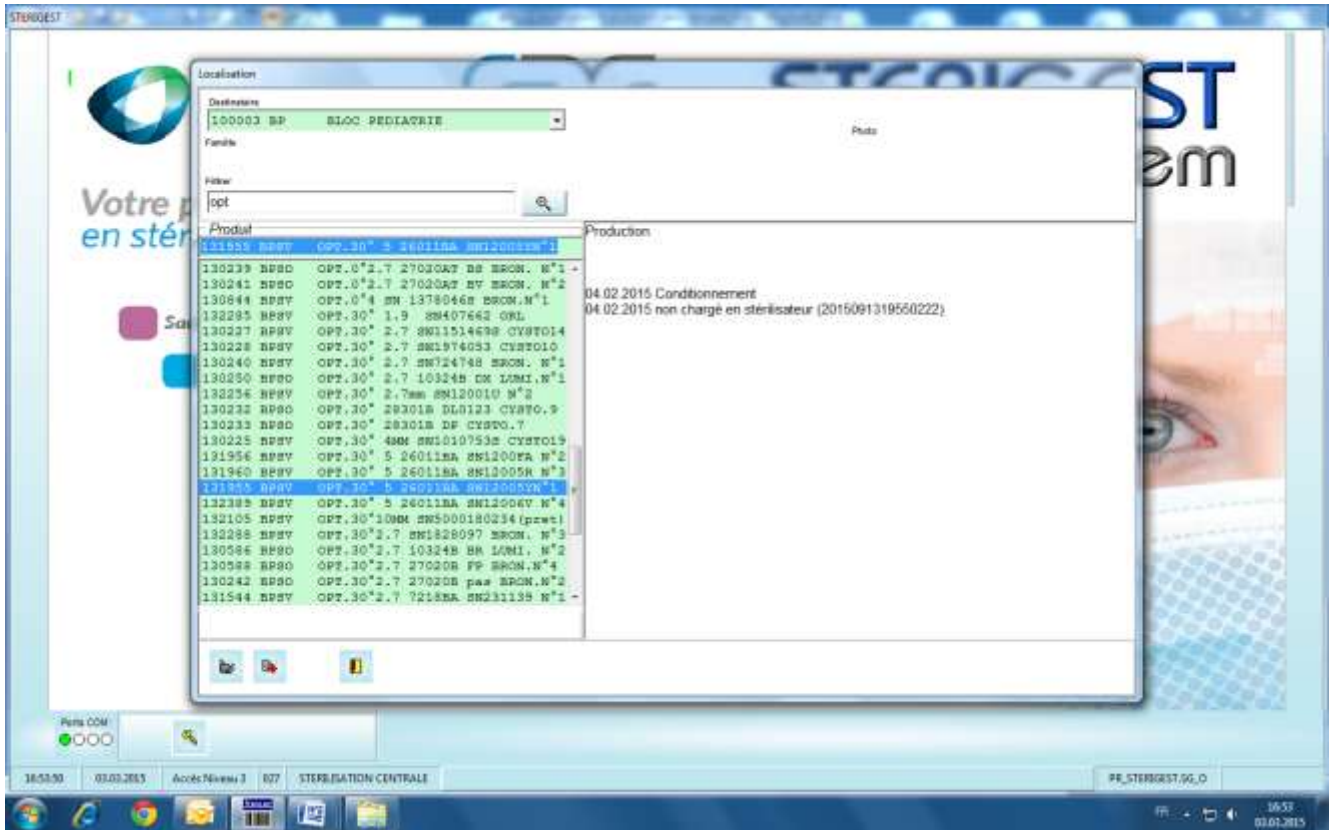

8. Ci-dessous la réparation en cours est indiquée

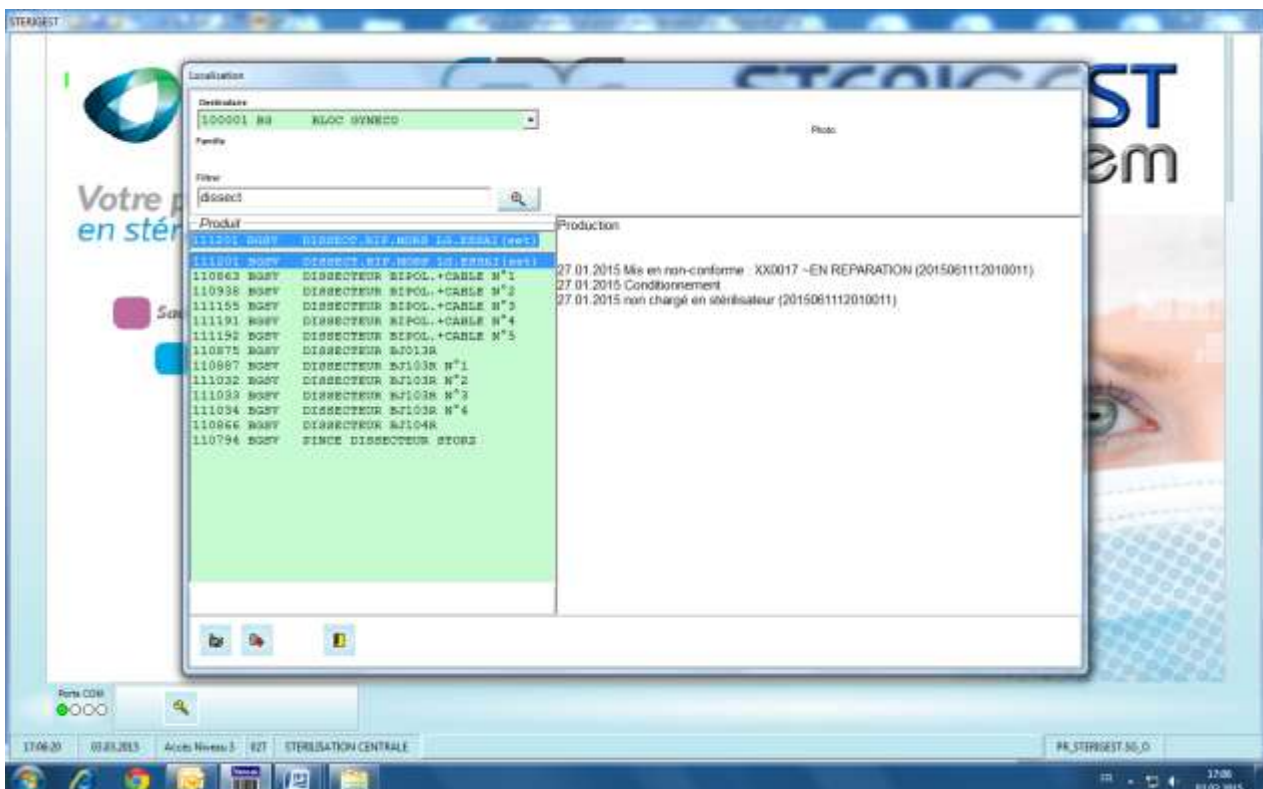

9. Il peut y avoir d'autres mises en non-conformité possibles et le libellé apparaîtra.
10. Lorsqu'il est indiqué **reconstitution en jaune** : attention cela peut-être une erreur de scannage après l'édition d'étiquette alors que le produit est déjà stérile. Demander confirmation en stérilisation au 31063